

DracoFoam

Infekt Ferse

Schaumstoffwundauflage mit Polyhexanid für infizierte Wunden Anatomische Passform

DracoFoam Infekt Ferse ist eine sterile hydrophile Polyurethanschaumstoffwundauflage, die der Abdeckung der Wunde und Absorption des Exsudats dient. Die überschüssige Flüssigkeit wird zur Polyurethan-Membran transportiert, so dass diese dort abdampfen kann. **DracoFoam Infekt Ferse** schafft ein idealfeuchtes Wundklima und ist somit für eine Vielzahl von chronischen und sekundär heilenden Wunden geeignet. Der Polyurethanschaum ist besonders flexibel, wölbt sich in der Anwendung dem Wundgrund entgegen und besitzt ein hohes Exsudataufnahmevermögen. Die Polyurethanfolie verhindert das Entweichen des Sekrets und stellt eine Barriere gegen Erreger von außen dar. **DracoFoam Infekt Ferse** enthält die antimikrobiell wirkende Substanz Polyhexanid, welche in der Wundauflage als antimikrobielle Barriere fungiert, die Mikroorganismen aus dem Wundexsudat aufnimmt und einer Kolonisierung bzw. Verbreitung von Bakterien innerhalb der Wundauflage entgegenwirkt. Dadurch können Wundinfektionen verhindert bzw. die Ausbreitung eingedämmt werden.

Anwendungsgebiete:

DracoFoam Infekt Ferse ist geeignet für akute sowie chronische, kritisch kolonisierte oder infizierte Wunden mit mäßigem bis starkem Exsudataufkommen, z.B. oberflächliche Wunden wie Ulcus cruris (venös, arteriell), Dekubitus, diabetisches Fußulcus, Verbrennungen 2. Grades sowie Hautspendeareale an der Ferse.

Anwendungshinweise:

Vor der Anwendung von **DracoFoam Infekt Ferse** die Wunde reinigen und die Wundumgebungshaut sorgfältig trocknen. **DracoFoam Infekt Ferse** aus der sterilen Einzelverpackung entnehmen, die Wundauflage mit der weißen Schaumstoffseite auf die Wunde legen. Anschließend mit geeignetem Fixierungsmaterial, z. B. DracoFixiermull stretch oder elastischen Fixierbinden befestigen. Dabei ist zu beachten, dass die Schaumstoffwundauflage ausreichend über die Wundränder hinausgeht. Die Wundauflage ist mit einer sterilen Schere zuschneidbar.

Je nach Wundzustand und Exsudatmenge kann **DracoFoam Infekt Ferse** bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben.

DRACO®



DracoFoam Infekt Ferse darf nur einmal verwendet werden. **DracoFoam Infekt Ferse** ist steril, solange die Einzelverpackung ungeöffnet und unversehrt ist. **DracoFoam Infekt Ferse** nicht bei beschädigter Verpackung anwenden.

Eine Wunde steht immer im Zusammenhang mit dem Gesamtorganismus. Die Beseitigung aller Faktoren, die eine Wundheilung hemmen können, ist Voraussetzung für die erfolgreiche Wundbehandlung. Enthält Polyhexanid und Dexpanthenol.

Gegenanzeigen:

DracoFoam Infekt Ferse soll nicht verwendet werden bei:

- chirurgischen Implantaten
- Verbrennungen 3. Grades

DracoFoam Infekt Ferse nicht zusammen mit oxidierenden Lösungen wie z. B. Hypochlorit oder Wasserstoffperoxid anwenden.

Bei Schwangerschaft und Stillzeit bitte den Arzt konsultieren.

DracoFoam Infekt Ferse soll nicht bei Patienten mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegenüber Polyurethan oder Polyhexanid angewendet werden.

Verfügbare Größe:

Anatomische Passform PZN: 10317643

Produkte, die von Dr. Ausbüttel & Co. GmbH zum einmaligen Gebrauch bestimmt sind, dürfen nicht (wieder)aufbereitet werden. Eine (Wieder)aufbereitung zerstört die funktionale Integrität der Produkte.

CE 0482        4°C - 25°C

Rev.: 181127RW-13946-GAWH