

# DracoFoam

Infekt haft sensitiv

## Polyhexanidhaltige Schaumstoffwundauflage mit Silikon-Haftrand für infizierte Wunden

**DracoFoam Infekt haft sensitiv** ist eine sterile hydrophile Polyurethanschaumstoffwundauflage zur Abdeckung akuter und chronischer Wunden, Aufnahme und Speicherung von Wundexsudat sowie Begünstigung eines idealfeuchten Wundmilieus. Der flexible Polyurethan-Schaum wölbt sich in der Anwendung dem Wundgrund entgegen und besitzt ein hohes Exsudataufnahmevermögen. Die über-schüssige Flüssigkeit wird zur Polyurethan-Membran transportiert, sodass diese dort abdampfen kann. Die Polyurethan-Folie verhindert das Entweichen des Exsudats und stellt eine Barriere gegen Erreger von außen dar. Die Sensitiv-Silikon-Technologie des Haftrandes unterstützt eine hautschonende atraumatische Entfernung des Verbandes bei gleichzeitig guter Haftung.

**DracoFoam Infekt haft sensitiv** enthält die antimikrobiell wirkende Substanz Polyhexanid (PHMB), welche in der Wundauflage als antimikrobielle Barriere fungiert, die Mikroorganismen aus dem Wundexsudat aufnimmt und einer Kolonisierung bzw. Verbreitung von Bakterien innerhalb der Wundauflage entgegenwirkt. Dadurch können Wundinfektionen verhindert bzw. die Ausbreitung eingedämmt werden.

### Anwendungsgebiete:

**DracoFoam Infekt haft sensitiv** ist geeignet für akute sowie chronische, kritisch kolonisierte oder infizierte Wunden mit mäßigem bis starkem Exsudataufkommen, z. B. oberflächliche Wunden wie Ulcus cruris (venös, arteriell), Dekubitus, diabetisches Fußulcus, Verbrennungen 2. Grades sowie Hautspenderareale.

### Anwendungshinweise:

Vor der Anwendung von **DracoFoam Infekt haft sensitiv** ist die Wunde zu reinigen und die Wundumgebungshaut sorgfältig zu trocknen. Entnehmen Sie **DracoFoam Infekt haft sensitiv** aus der sterilen Einzelverpackung und entfernen Sie die erste Schutzfolie, ohne dabei das Wundkissen zu berühren. Bringen Sie den Verband mit dem Wundkissen zur Wunde hin an und entfernen Sie die zweite Schutzfolie. Drücken Sie die Kleberänder anschließend sanft an. Die Sensitiv-Silikon-Technologie erlaubt ein Repositionieren des Verbandes, um eine faltenfreie Applikation zu erzielen. Dank des Haftrandes des Produkts wird keine weitere Fixierung benötigt. Es ist darauf zu achten, dass die Schaumstoffwundauflage ausreichend über die Wundränder hinausgeht und der Haftrand nicht auf die Wunde geklebt wird. Tiefere Wunden sollten entsprechend der lokalen Behandlungsstandards und/oder gängigen Leitlinie(n) gegebenenfalls zuvor mit geeignetem Material austamponiert werden. Je nach Wundzustand und Exsudatmenge kann



**DracoFoam Infekt haft sensitiv** unter ärztlicher Beobachtung bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben. Der Verband ist spätestens zu wechseln, wenn das Exsudat bis zum Rand des Wundkissens vorgedrungen ist.

**DracoFoam Infekt haft sensitiv** kann auch im Rahmen einer Kompressionstherapie eingesetzt werden.

**DracoFoam Infekt haft sensitiv** ist steril, solange die Einzelverpackung ungeöffnet und unversehrt ist.

**DracoFoam Infekt haft sensitiv** nicht bei beschädigter Verpackung anwenden.

**DracoFoam Infekt haft sensitiv** keinem Frost aussetzen.

Eine Wunde steht immer im Zusammenhang mit dem Gesamtorganismus. Die Beseitigung aller Faktoren, die eine Wundheilung hemmen können, ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Wundbehandlung.

Enthält Polyhexanid und Dexpanthenol.

### Gegenanzeigen:

**DracoFoam Infekt haft sensitiv** soll nicht verwendet werden bei:

- chirurgischen Implantaten
- Verbrennungen 3. Grades

Bei Schwangerschaft und Stillzeit bitte den Arzt konsultieren.

**DracoFoam Infekt haft sensitiv** soll nicht bei Patienten mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegenüber Polyurethan, Polyhexanid oder Silikon(kleber) angewendet werden.

Die Oberfläche des Verbandes sollte nicht mit okklusiven Verbänden abgedeckt werden, da dies das Exsudatmanagement von **DracoFoam Infekt haft sensitiv** beeinträchtigen kann. Zudem sollte **DracoFoam Infekt haft sensitiv** nicht zusammen mit oxidierenden Lösungen, wie z. B. Hypochlorit oder Wasserstoffperoxid angewendet werden. Diese Lösungen können die Struktur und Eigenschaften des Polyurethanschaums beeinträchtigen. Fetthaltige sowie ölige Cremes oder Salben, die auf die Wundumgebungshaut aufgebracht werden, können die Klebkraft des Haftrandes des Produkts herabsetzen. Ein sicherer Halt der Wundaufgabe kann unter diesen Umständen nicht gewährleistet werden. **DracoFoam Infekt haft sensitiv** darf nur einmal verwendet werden. Eine Wiederverwendung kann zu Kreuzinfektionen führen und beeinträchtigt die Produktwirkung.

Produkte, die von Dr. Ausbüttel & Co. GmbH zum einmaligen Gebrauch bestimmt sind, dürfen nicht (wieder)aufbereitet werden. Eine (Wieder)aufbereitung zerstört die funktionale Integrität der Produkte.

### Verfügbare Größen:

7,5 cm x 7,5 cm PZN: 15623296

10 cm x 10 cm PZN: 15623304

12,5 cm x 12,5 cm PZN: 15623310

CE 0482

STERILE EO



Rev.: 200207RW-13957-GA