

DracoFoam

Infekt

Schaumstoffwundauflage mit Polyhexanid für infizierte Wunden

DracoFoam Infekt ist eine sterile hydrophile Polyurethanschaumstoffwundauflage, die der Abdeckung der Wunde und Absorption des Exsudats dient. Die überschüssige Flüssigkeit wird zur Polyurethan-Membran transportiert, so dass diese dort abdampfen kann. **DracoFoam Infekt** schafft ein idealefeuchtes Wundklima und ist somit für eine Vielzahl von chronischen und sekundär heilenden Wunden geeignet. Der Polyurethanschaum ist besonders flexibel, wölbt sich in der Anwendung dem Wundgrund entgegen und besitzt ein hohes Exsudataufnahmevermögen. Die Polyurethanfolie verhindert das Entweichen des Sekrets und stellt eine Barriere gegen Erreger von außen dar. **DracoFoam Infekt** enthält die antimikrobiell wirkende Substanz Polyhexanid, welche in der Wundauflage als antimikrobielle Barriere fungiert, die Mikroorganismen aus dem Wundexsudat aufnimmt und einer Kolonisierung bzw. Verbreitung von Bakterien innerhalb der Wundauflage entgegenwirkt. Dadurch können Wundinfektionen verhindert bzw. die Ausbreitung eingedämmt werden.

Anwendungsgebiete:

DracoFoam Infekt ist geeignet für akute sowie chronische, kritisch kolonisierte oder infizierte Wunden mit mäßigem bis starkem Exsudataufkommen, z. B. oberflächliche Wunden wie Ulcus cruris (venös, arteriell), Dekubitus, diabetisches Fußsulkus, Verbrennungen 2. Grades sowie Hautspendeeareale.

Anwendungshinweise:

Vor der Anwendung von **DracoFoam Infekt** die Wunde reinigen und die Wundumgebungshaut sorgfältig trocknen. **DracoFoam Infekt** aus der sterilen Einzelverpackung entnehmen, die Wundauflage mit der weißen Schaumstoffseite auf die Wunde legen. Anschließend mit geeignetem Fixierungsmaterial, z. B. DracoFixiermull stretch oder elastischen Fixierbinden befestigen. Dabei ist zu beachten, dass die Schaumstoffwundauflage ausreichend über die Wundränder hinausgeht. Die Wundauflage ist mit einer sterilen Schere zuschneidbar.

Je nach Wundzustand und Exsudatmenge kann **DracoFoam Infekt** bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben. **DracoFoam Infekt** darf nur einmal verwendet werden. **DracoFoam Infekt** ist steril, solange die Einzelverpackung ungeöffnet und unversehrt ist. **DracoFoam Infekt** nicht bei beschädigter Verpackung anwenden. Eine Wunde steht immer im Zusammenhang mit dem Gesamtorganismus. Die Beseitigung aller Faktoren, die eine Wundheilung hemmen können, ist Voraussetzung für die erfolgreiche Wundbehandlung. Enthält Polyhexanid und Dexpanthenol.



Gegenanzeigen:

DracoFoam Infekt soll nicht verwendet werden bei:

- chirurgischen Implantaten
- Verbrennungen 3. Grades

DracoFoam Infekt nicht zusammen mit oxidierenden Lösungen wie z.B. Hypochlorit oder Wasserstoffperoxid anwenden.

Bei Schwangerschaft und Stillzeit bitte den Arzt konsultieren.

DracoFoam Infekt soll nicht bei Patienten mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegenüber Polyurethan oder Polyhexanid angewendet werden.

Verfügbare Größen:

5 cm x 5 cm PZN: 10317608

10 cm x 10 cm PZN: 10317614

10 cm x 20 cm PZN: 10317620

20 cm x 20 cm PZN: 10317637

Produkte, die von Dr. Ausbüttel & Co. GmbH zum einmaligen Gebrauch bestimmt sind, dürfen nicht (wieder)aufbereitet werden. Eine (Wieder)aufbereitung zerstört die funktionale Integrität der Produkte.



Rev.: 181127RW-13942-GAWH