



DracoFoam

haft sensitiv

Schaumstoffwundauflage mit Silikon-Haftrand

Zur Bewältigung überschüssigen Exsudats akuter und chronischer Problemwunden

DracoFoam haft sensitiv ist eine sterile hydrophile Polyurethanschaumstoffwundauflage zur Abdeckung akuter und chronischer Wunden, zur Aufnahme und Speicherung von Wundexsudat sowie zur Erhaltung eines feuchten Wundmilieus. Der flexible Polyurethan-Schaum wölbt sich in der Anwendung dem Wundgrund entgegen und besitzt ein hohes Exsudataufnahmevermögen. Die überschüssige Flüssigkeit wird zur Polyurethan-Membran transportiert, sodass diese dort abdampfen kann. Die Polyurethan-Folie verhindert das Entweichen des Exsudats und stellt eine Barriere gegen Erreger von außen dar.

DracoFoam haft sensitiv ist zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal sowie Laien im häuslichen, ambulanten und stationären Umfeld geeignet.

Indikationen:

DracoFoam haft sensitiv ist geeignet für Wunden mit hohem Exsudataufkommen, z. B. oberflächliche und tiefe akute und chronische Wunden wie Ulcus cruris (venös, arteriell), Dekubitus oder diabetisches Fußsyndrom, Spalthautentnahmestellen, postoperative Wunden und Verbrennungen bis zum 2. Grad.

Kontraindikationen:

DracoFoam haft sensitiv darf nicht bei zu trockenen Wunden und/oder bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Polyurethan oder Silikon(kleber) angewendet werden. Außerdem darf **DracoFoam haft sensitiv** nicht bei Verbrennungen 3. Grades angewendet werden.

Anwendungshinweise:

Entnehmen Sie **DracoFoam haft sensitiv** aus der sterilen Einzelverpackung und entfernen Sie die erste Schutzfolie, ohne dabei das Wundkissen zu berühren. Bringen Sie den Verband mit dem Wundkissen zur Wunde hin an und entfernen Sie die zweite Schutzfolie. Drücken Sie die Kleberänder anschließend sanft an. Die Sensitiv-Silikon-Technologie erlaubt ein Repositionieren des Verbandes, um eine faltenfreie Applikation zu erzielen und ist zur Anwendung auf fragiler Haut geeignet. Dank des Haftrandes des Produkts wird keine weitere Fixierung benötigt. Es ist darauf zu achten, dass die Schaumstoffwundauflage ausreichend über die Wundränder hinausgeht und der Haftrand nicht auf die Wunde geklebt wird.

Vor der Anwendung von **DracoFoam haft sensitiv** ist die Wunde zu reinigen und die Wundumgebungshaut sorgfältig zu trocknen.

DracoFoam haft sensitiv kann auch im Rahmen einer Kompressionstherapie eingesetzt werden.

Tiefere Wunden sollten entsprechend der lokalen Behandlungsstandards und/oder gängigen Leitlinie(n) gegebenenfalls zuvor mit geeignetem Material austamponiert werden.

Je nach Wundzustand und Exsudatmenge kann **DracoFoam haft sensitiv** bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben. Der Verband ist spätestens zu wechseln, wenn das Exsudat bis zum Rand des Wundkissens vorgedrungen ist.





Weitere Hinweise:

DracoFoam haft sensitiv sollte nicht bei nicht-intakter Wundumgebungshaut angewendet werden. Zudem ist **DracoFoam haft sensitiv** nicht als Tamponade zu verwenden. Eine Anwendung in Kombination mit oxidierenden Lösungen (z.B. Hypochlorit oder Wasserstoffperoxid) kann die Beschaffenheit und Leistung des Produktes ernsthaft beeinträchtigen und die Wundheilung stören. Fettthaltige sowie ölige Cremes oder Salben, die auf die Wundumgebungshaut aufgebracht werden, können die Klebkraft des Haftrandes des Produktes herabsetzen. Ein sicherer Halt der Wundauflage kann unter diesen Umständen nicht gewährleistet werden. Eine Abdeckung der Wundauflage mit okklusiven Verbänden kann sich negativ auf das Exsudatmanagement auswirken und wird daher nicht empfohlen.

Bei stagnierendem oder sich verschlechterndem Wundzustand sollte ein Arzt konsultiert werden. Bei kritisch kolonisierten oder infizierten Wunden kann der Einsatz nach ärztlichem Ermessen erfolgen, wenn eine geeignete Behandlung der Infektion gewährleistet ist. Dabei ist die Verbandtragedauer gegebenenfalls zu verkürzen und die Wunde regelmäßig von einem Arzt gemäß den jeweiligen Standards zu untersuchen und zu versorgen.

Eine Wunde steht immer im Zusammenhang mit dem Gesamtorganismus. Die Beseitigung aller Faktoren, die eine Wundheilung hemmen können, ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Wundbehandlung.

Bei beschädigtem oder vor Gebrauch unabsichtlich geöffnetem Sterilbarriersystem darf das Produkt nicht mehr verwendet werden.

DracoFoam haft sensitiv ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Bei Wiederverwendung oder Wiederaufbereitung des Produkts kann dessen Beschaffenheit und Leistung ernsthaft beeinträchtigt, die Wundheilung gestört und das Infektionsrisiko erhöht werden.

Sollte dieses Produkt in Zusammenhang mit einem schwerwiegenden Vorkommnis stehen (Tod eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person; vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Anwenders oder anderer Personen; schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Gesundheit), ist dieser Vorfall dem Hersteller und dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zu melden.

DracoFoam haft sensitiv kann nach dem Gebrauch über den Hausmüll entsorgt werden.

Verfügbare Größen:

5 cm x 5 cm	PZN: 11376174
7,5 cm x 7,5 cm	PZN: 10342078
10 cm x 10 cm	PZN: 10342115
12,5 cm x 12,5 cm	PZN: 10342144
12 cm x 22 cm	PZN: 17438031
17 cm x 17 cm	PZN: 17438048
19 cm x 19 cm	PZN: 17438054



Das Produkt ist für die angegebene maximale Wundgröße geeignet.



Das Produkt ist für stark exsudierende Wunden geeignet.



Das Produkt kann nicht zugeschnitten werden.



Das Produkt ist sanft haftend und es wird keine Sekundärfixierung benötigt.



Das Produkt ist zum Duschen geeignet.



Je nach Wundzustand und Exsudatmenge kann das Produkt bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben.

CE 0482



Medizinprodukt

Rev.: 240723XRW-13947-GA



Dr. Ausbüttel & Co. GmbH • Ernst-Abbe-Straße 4 • 44149 Dortmund • Deutschland • www.draco.de

