

# DracoFoam

**INFEKT PRO HAFT SENSITIV**



## Bakterienbindende Schaumstoffwundauflage mit Silikon-Haftrand

Zur Bewältigung überschüssigen Exsudats akuter und chronischer Problemwunden

Auch zur Anwendung bei infizierten Problemwunden. Wirkstofffrei.

**DracoFoam Infekt Pro haft sensitiv** ist eine sterile hydrophile Polyurethanschamstoffwundauflage zur Abdeckung akuter und chronischer Wunden, zur Aufnahme und Speicherung von Wundexsudat sowie zur Erhaltung eines feuchten Wundmilieus. Der Polyurethan-Schaum besitzt ein hohes Exsudataufnahmevermögen. Die überschüssige Flüssigkeit wird zur Polyurethan-Membran transportiert, sodass diese dort abdampfen kann. Die Polyurethan-Folie verhindert das Entweichen des Exsudats und stellt eine Barriere gegen Erreger von außen dar.

Das Wundpad von **DracoFoam Infekt Pro haft sensitiv** ist mit einem wirkstofffreien bakterienbindenden Netz versehen, welches Mikroorganismen aus dem Wundexsudat bindet und mit jedem Verbandwechsel die Keimlast in der Wunde reduziert. Für ein wirksames Infektionsmanagement von infizierten sowie Infektgefährdeten Wunden.

**DracoFoam Infekt Pro haft sensitiv** ist zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal sowie Laien im häuslichen, ambulanten und stationären Umfeld geeignet.

### Indikationen:


**DracoFoam Infekt Pro haft sensitiv** ist geeignet für Wunden mit schwachem bis hohem Exsudataufkommen, z. B. oberflächliche und tiefere akute und chronische, kritisch kolonisierte oder infizierte Wunden wie Ulcus cruris (venös, arteriell), Dekubitus oder diabetisches Fußsyndrom, Spalthautentnahmestellen, postoperative Wunden und Verbrennungen bis zum 2. Grad.

### Kontraindikationen:

**DracoFoam Infekt Pro haft sensitiv** darf nicht bei zu trockenen Wunden und/oder bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Polyurethan, Silikon(kleber) oder Polyamid angewendet werden. Außerdem darf **DracoFoam Infekt Pro haft sensitiv** nicht bei Verbrennungen 3. Grades angewendet werden.



Wundrand  
trocknen

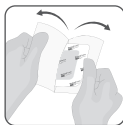

Wundauflage steril entnehmen  
und Schutzfolie entfernen



Faltenfrei andrücken.  
Kann repositioniert werden.

### Anwendungshinweise:

Vor der Anwendung von **DracoFoam Infekt Pro haft sensitiv** ist die Wunde zu reinigen und die Wundumgebungshaut sorgfältig zu trocknen.

Entfernen Sie die erste Schutzfolie, ohne dabei das Wundkissen zu berühren. Bringen Sie den Verband mit dem Wundkissen zur Wunde hin an und entfernen Sie die zweite Schutzfolie. Drücken Sie die Kleberänder anschließend sanft an. Die Sensitiv-Silikon-Technologie erlaubt ein Repositionieren des Verbandes, um eine faltenfreie Applikation zu erzielen und ist zur Anwendung auf fragiler Haut geeignet. Dank des Haftrandes des Produkts wird keine weitere Fixierung benötigt. Es ist darauf zu achten, dass die Schaumstoffwundauflage ausreichend über die Wundränder hinausgeht und der Haftrand nicht auf die Wunde geklebt wird.

**DracoFoam Infekt Pro haft sensitiv** kann auch im Rahmen einer Kompressionstherapie eingesetzt werden.

Tiefere Wunden sollten entsprechend der lokalen Behandlungsstandards und/oder gängigen Leitlinie(n) gegebenenfalls zuvor mit geeignetem Material austamponiert werden.

Je nach Wundzustand und Exsudatmenge kann **DracoFoam Infekt Pro haft sensitiv** unter ärztlicher Aufsicht bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben. Der Verband ist spätestens zu wechseln, wenn das Exsudat bis zum Rand des Wundkissens vorgedrungen ist.

#### Weitere Hinweise:

**DracoFoam Infekt Pro haft sensitiv** sollte nicht bei nicht-intakter Wundumgebungshaut angewendet werden. Zudem ist **DracoFoam Infekt Pro haft sensitiv** nicht als Tamponade zu verwenden. Eine Anwendung in Kombination mit oxidierenden Lösungen (z. B. Hypochlorit oder Wasserstoffperoxid) kann die Beschaffenheit und die Leistung des Produktes ernsthaft beeinträchtigen und die Wundheilung stören. Fetthaltige sowie ölige Cremes oder Salben, die auf die Wundumgebungshaut aufgebracht werden, können die Klebkraft des Hafttrandes des Produktes herabsetzen. Ein sicherer Halt der Wundauflage kann unter diesen Umständen nicht gewährleistet werden. Eine Abdeckung der Wundaufgabe mit okklusiven Verbänden kann sich negativ auf das Exsudatmanagement auswirken und wird daher nicht empfohlen.

Die Anwendung von **DracoFoam Infekt Pro haft sensitiv** ersetzt weder eine gegebenenfalls indizierte systemische Therapie noch eine andere adäquate Infektionsbehandlung. Insbesondere bei kritisch kolonisierten oder infizierten Wunden sollte die Wunde gemäß den jeweiligen Standards von einem Arzt untersucht und versorgt werden. Ein Arzt sollte zudem bei stagnierendem oder sich verschlechterndem Wundzustand konsultiert werden. Je nach Wundzustand kann ein früherer Verbandwechsel nötig sein.

Eine Wunde steht immer im Zusammenhang mit dem Gesamtorganismus. Die Beseitigung aller Faktoren, die eine Wundheilung hemmen können, ist Voraussetzung für die erfolgreiche Wundbehandlung.

Bei beschädigtem oder vor Gebrauch unabsichtlich geöffnetem Sterilbarriersystem darf das Produkt nicht mehr verwendet werden.

**DracoFoam Infekt Pro haft sensitiv** ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Bei Wiederverwendung oder Wiederaufbereitung des Produkts kann dessen Beschaffenheit und Leistung ernsthaft beeinträchtigt, die Wundheilung gestört und das Infektionsrisiko erhöht werden.

Sollte dieses Produkt in Zusammenhang mit einem schwerwiegenden Vorkommnis stehen (Tod eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person; vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Anwenders oder anderer Personen; schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Gesundheit), ist dieser Vorfall dem Hersteller und dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zu melden.

**DracoFoam Infekt Pro haft sensitiv** kann nach dem Gebrauch über den Hausmüll entsorgt werden.

#### Verfügbare Größen:

7,5 cm x 7,5 cm PZN: 19964048    10 cm x 10 cm PZN: 19964137    12,5 cm x 12,5 cm PZN: 19964172



Das Produkt ist für die angegebene maximale Wundgröße geeignet.



Das Produkt ist für stark exsudierende Wunden geeignet.



Das Produkt ist sanft haftend und es wird keine Sekundärfixierung benötigt.



Das Produkt kann nicht zugeschnitten werden.



Das Produkt ist zum Duschen geeignet.



Je nach Wundzustand und Exsudatmenge kann das Produkt unter ärztlicher Aufsicht bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben.

CE 0482

STERILE EO



MD

Medizinprodukt

Rev.: 2026031388881-DFIPHS-GA



Dr. Ausbüttel GmbH & Co. KG • Ernst-Abbe-Straße 4  
44149 Dortmund • Deutschland • www.draco.de

