

DracoFoam

INFEKT PRO



Bakterienbindende Schaumstoffwundauflage

Zur Bewältigung überschüssigen Exsudats akuter und chronischer Problemwunden

Auch zur Anwendung bei infizierten Problemwunden. Wirkstofffrei

DracoFoam Infekt Pro ist eine sterile hydrophile Polyurethanschaumstoffwundauflage zur Abdeckung akuter und chronischer Wunden, zur Aufnahme und Speicherung von Wundexsudat sowie zur Erhaltung eines feuchten Wundmilieus. Der flexible Polyurethan-Schaum wölbt sich in der Anwendung dem Wundgrund entgegen und besitzt ein hohes Exsudataufnahmevermögen. Die überschüssige Flüssigkeit wird zur Polyurethan-Membran transportiert, sodass diese dort abdampfen kann. Die Polyurethan-Folie verhindert das Entweichen des Exsudats und stellt eine Barriere gegen Erreger von außen dar.

DracoFoam Infekt Pro ist mit einem wirkstofffreien bakterienbindenden Netz ummantelt, welches Mikroorganismen aus dem Wundexsudat bindet und mit jedem Verbandwechsel die Keimlast in der Wunde reduziert. Für ein wirksames Infektionsmanagement von infizierten sowie Infekt-gefährdeten Wunden. Auch mit der Netzmantelung des Schaumes bleibt die mögliche Wundgröße entsprechend der Produktgröße (die Wundpadfläche ist gleich der angegebenen Maße).


DracoFoam Infekt Pro ist zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal sowie Laien im häuslichen, ambulanten und stationären Umfeld geeignet.

Indikationen:

DracoFoam Infekt Pro ist geeignet für Wunden mit schwachem bis hohem Exsudataufkommen, z. B. oberflächliche und tiefere akute und chronische, kritisch kolonisierte oder infizierte Wunden wie Ulcus cruris (venös, arteriell), Dekubitus oder diabetisches Fußsyndrom, Spalthautentnahmestellen, postoperative Wunden und Verbrennungen bis zum 2. Grad.

Kontraindikationen:

DracoFoam Infekt Pro darf nicht bei zu trockenen Wunden und/ oder bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Polyurethan und Polyamid angewendet werden. Außerdem darf **DracoFoam Infekt Pro** nicht bei Verbrennungen 3. Grades angewendet werden.

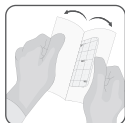

Wundauflage steril entnehmen



Weißer Seite auf die Wunde aufbringen



Wundauflage fixieren

Anwendungshinweise:

Vor der Anwendung von **DracoFoam Infekt Pro** ist die Wunde zu reinigen und die Wundumgebungshaut sorgfältig zu trocknen. Entnehmen Sie **DracoFoam Infekt Pro** aus der sterilen Einzelverpackung und legen Sie die Wundauflage mit der unbedruckten Netzseite auf die Wunde. Dabei ist darauf zu achten, dass die Schaumstoffwundauflage ausreichend über die Wundränder hinausgeht. Anschließend befestigen Sie die Wundauflage mit geeignetem Fixiermaterial, z. B. DracoFixiermull stretch oder elastischen Fixierbinden.

Die Wundauflage ist aufgrund der Ummantelung nicht zuschneidbar.

DracoFoam Infekt Pro kann auch im Rahmen einer Compressionstherapie eingesetzt werden.

Tiefere Wunden sollten entsprechend der lokalen Behandlungsstandards und/oder gängigen Leitlinie(n) gegebenenfalls zuvor mit geeignetem Material austamponiert werden. Je nach Wundzustand und Exsudatmenge kann **DracoFoam Infekt Pro** unter ärztlicher Aufsicht bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben. Das aufgedruckte Exsudatraster vereinfacht die Beurteilung der Exsudatmenge. Der Verband ist spätestens zu wechseln, wenn das Exsudat bis zum Rand des Wundkissens vorgedrungen ist.

Weitere Hinweise:

DracoFoam Infekt Pro ist nicht als Tamponade zu verwenden. Eine Anwendung in Kombination mit oxidierenden Lösungen (z. B. Hypochlorit oder Wasserstoffperoxid) kann die Beschaffenheit und die Leistung des Produktes ernsthaft beeinträchtigen und die Wundheilung stören.

Die Anwendung von **DracoFoam Infekt Pro** ersetzt weder eine gegebenenfalls indizierte systemische Therapie noch eine andere adäquate Infektionsbehandlung. Insbesondere bei kritisch kolonisierten oder infizierten Wunden sollte die Wunde gemäß den jeweiligen Standards von einem Arzt untersucht und versorgt werden. Ein Arzt sollte zudem bei stagnierendem oder sich verschlechterndem Wundzustand konsultiert werden. Je nach Wundzustand kann ein früherer Verbandwechsel nötig sein.

Eine Wunde steht immer im Zusammenhang mit dem Gesamtorganismus. Die Beseitigung aller Faktoren, die eine Wundheilung hemmen können, ist Voraussetzung für die erfolgreiche Wundbehandlung.

Bei beschädigtem oder vor Gebrauch unabsichtlich geöffnetem Sterilbarriersystem darf das Produkt nicht mehr verwendet werden.

DracoFoam Infekt Pro ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Bei Wiederverwendung oder Wiederaufbereitung des Produkts kann dessen Beschaffenheit und Leistung ernsthaft beeinträchtigt, die Wundheilung gestört und das Infektionsrisiko erhöht werden.

Sollte dieses Produkt in Zusammenhang mit einem schwerwiegenden Vorkommnis stehen (Tod eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person; vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Anwenders oder anderer Personen; schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Gesundheit), ist dieser Vorfall dem Hersteller und dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zu melden.

DracoFoam Infekt Pro kann nach dem Gebrauch über den Hausmüll entsorgt werden.

Verfügbare Größen:

5 cm x 5 cm PZN: 19964031
10 cm x 10 cm PZN: 19964143
10 cm x 20 cm PZN: 19964166
18 cm x 18 cm PZN: 19964077



Das Produkt ist für die angegebene maximale Wundgröße geeignet.



Das Produkt ist für stark exsudierende Wunden geeignet.



Das Produkt ist nicht selbsthaftend, befestigen Sie es mit geeignetem Fixiermaterial.



Das Produkt kann nicht zugeschnitten werden.



Das Produkt ist nicht zum Duschen geeignet.



Je nach Wundzustand und Exsudatmenge kann das Produkt unter ärztlicher Aufsicht bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben.

CE 0482

STERILE EO



MD

Medizinprodukt

Rev.: 20260211RW-14012-GA



Dr. Ausbüttel GmbH & Co. KG • Ernst-Abbe-Straße 4
44149 Dortmund • Deutschland • www.draco.de

