



# DracoFoam

## Schaumstoffwundauflage Zur Bewältigung überschüssigen Exsudats akuter und chronischer Problemwunden


**DracoFoam** ist eine sterile hydrophile Polyurethanschaumstoffwundauflage zur Abdeckung akuter und chronischer Wunden, zur Aufnahme und Speicherung von Wundexsudat sowie zur Erhaltung eines feuchten Wundmilieus. Der flexible Polyurethan-Schaum wölbt sich in der Anwendung dem Wundgrund entgegen und besitzt ein hohes Exsudataufnahmevermögen. Die überschüssige Flüssigkeit wird zur Polyurethan-Membran transportiert, sodass diese dort abdampfen kann. Die Polyurethan-Folie verhindert das Entweichen des Exsudats und stellt eine Barriere gegen Erreger von außen dar.

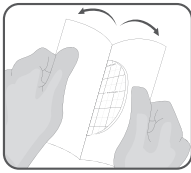

Wundauflage steril entnehmen

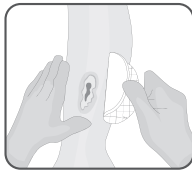

Weißer Seite auf die Wunde aufbringen

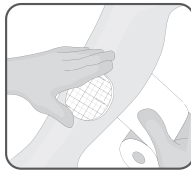

Wundauflage fixieren

**DracoFoam** ist zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal sowie Laien im häuslichen, ambulanten und stationären Umfeld geeignet.

### Indikationen:

**DracoFoam** ist geeignet für Wunden mit hohem Exsudataufkommen, z. B. oberflächliche und tiefere akute und chronische Wunden wie Ulcus cruris (venös, arteriell), Dekubitus oder diabetisches Fußsyndrom, Spalthautentnahmestellen, postoperative Wunden und Verbrennungen bis zum 2. Grad.

### Kontraindikationen:

**DracoFoam** darf nicht bei zu trockenen Wunden und/oder bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Polyurethan angewendet werden. Außerdem darf **DracoFoam** nicht bei Verbrennungen 3. Grades angewendet werden.

### Anwendungshinweise:

Vor der Anwendung von **DracoFoam** ist die Wunde zu reinigen und die Wundumgebungshaut sorgfältig zu trocknen. Entnehmen Sie **DracoFoam** aus der sterilen Einzelverpackung und legen Sie die Wundauflage mit der unbedruckten Schaumstoffseite auf die Wunde. Anschließend befestigen Sie die Wundauflage mit geeignetem Fixiermaterial, z. B. DracoFixiermull stretch oder elastischen Fixierbinden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Schaumstoffwundauflage ausreichend über die Wundränder hinausgeht. Die Wundauflage ist mit einer sterilen Schere zuschneidbar. **DracoFoam** kann auch im Rahmen einer Kompressionstherapie eingesetzt werden. Tiefere Wunden sollten entsprechend der lokalen Behandlungsstandards und/oder gängigen Leitlinie(n) gegebenenfalls zuvor mit geeignetem Material austamponiert werden. Je nach Wundzustand und Exsudatmenge kann **DracoFoam** bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben. Das aufgedruckte Exsudatraster vereinfacht die Beurteilung der Exsudatmenge. Der Verband ist spätestens zu wechseln, wenn das Exsudat bis zum Rand des Wundkisses vorgedrungen ist.

### Weitere Hinweise:

**DracoFoam** ist nicht als Tamponade zu verwenden. Eine Anwendung in Kombination mit oxidierenden Lösungen (z. B. Hypochlorit oder Wasserstoffperoxid) kann die Beschaffenheit und Leistung des Produktes ernsthaft beeinträchtigen und die Wundheilung stören. Bei stagnierendem oder sich verschlechterndem Wundzustand sollte ein Arzt konsultiert werden. Bei kritisch kolonisierten oder infizierten Wunden kann der Einsatz nach ärztlichem Ermessen erfolgen, wenn eine geeignete Behandlung der Infektion gewährleistet ist. Dabei ist die Verbandtragedauer gegebenenfalls zu verkürzen und die Wunde regelmäßig von einem Arzt gemäß den jeweiligen Standards zu untersuchen und zu versorgen. Eine Wunde steht immer im Zusammenhang mit dem Gesamtorganismus. Die Beseitigung aller Faktoren, die eine Wundheilung hemmen können, ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Wundbehandlung. Bei beschädigtem oder vor Gebrauch unabsichtlich geöffnetem Sterilbarriersystem darf das Produkt nicht mehr verwendet werden. **DracoFoam** ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Bei Wiederverwendung oder Wiederaufbereitung des Produkts kann dessen Beschaffenheit und Leistung ernsthaft beeinträchtigt, die Wundheilung gestört und das Infektionsrisiko erhöht werden. Sollte dieses Produkt in Zusammenhang mit einem schwerwiegenden Vorkommnis stehen (Tod eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person; vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Anwenders oder anderer Personen; schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Gesundheit), ist dieser Vorfall dem Hersteller und dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zu melden.

**DracoFoam** kann nach dem Gebrauch über den Hausmüll entsorgt werden.

### Verfügbare Größen:

Oval 3 cm x 4 cm	PZN: 19897731	10 cm x 10 cm	PZN: 04350429
Oval 12 cm x 8 cm	PZN: 19897748	10 cm x 20 cm	PZN: 06836544
Oval 16 cm x 6 cm	PZN: 19897754	20 cm x 20 cm	PZN: 03693587
5 cm x 5 cm	PZN: 07415075	Multishape 20 cm x 20 cm	PZN: 19239382
5 cm x 30 cm	PZN: 19239376	20 cm x 50 cm	PZN: 19441089
		30 cm x 30 cm	PZN: 19441095



Das Produkt ist für die angegebene maximale Wundgröße geeignet.



Das Produkt ist nicht selbsthaftend, befestigen Sie es mit geeignetem Fixiermaterial.



Das Produkt kann mit einer sterilen Schere zugeschnitten werden.



Das Produkt ist für stark exsudierende Wunden geeignet.



Das Produkt ist nicht zum Duschen geeignet.



Je nach Wundzustand und Exsudatmenge kann das Produkt bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben.

CE 0482

STERILE

EO



Medizinprodukt

Rev.: 20251020RW-100171-GA



Dr. Ausbüttel & Co. GmbH • Ernst-Abbe-Straße 4  
44149 Dortmund • Deutschland • [www.draco.de](http://www.draco.de)

