

DracoFoam

Sakral

Haftende Schaumstoffwundauflage

Zur Bewältigung überschüssigen Exsudats akuter und chronischer Problemwunden

DracoFoam Sakral ist eine sterile hydrophile Polyurethanschaumstoffwundauflage zur Abdeckung akuter und chronischer Wunden, zur Aufnahme und Speicherung von Wundexsudat sowie zur Erhaltung eines feuchten Wundmilieus. Der flexible Polyurethan-Schaum wölbt sich in der Anwendung dem Wundgrund entgegen und besitzt ein hohes Exsudataufnahmevermögen. Die überschüssige Flüssigkeit wird zur Polyurethan-Membran transportiert, sodass diese dort abdampfen kann. Die Polyurethan-Folie verhindert das Entweichen des Exsudats und stellt eine Barriere gegen Erreger von außen dar.

DracoFoam Sakral ist zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal sowie Laien im häuslichen, ambulanten und stationären Umfeld geeignet.

Indikationen:

DracoFoam Sakral ist besonders geeignet für Wunden mit hohem Exsudataufkommen im Sakralbereich wie z. B. Dekubitus. Es ist auch geeignet für andere Körperstellen mit oberflächlichen und tieferen akuten und chronischen Wunden wie postoperative Wunden oder Verbrennungen bis zum 2. Grad.

Kontraindikationen:

DracoFoam Sakral darf nicht bei zu trockenen Wunden und/oder bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Polyurethan, Polyacrylat(kleber) oder Silikon(kleber) angewendet werden. Außerdem darf **DracoFoam Sakral** nicht bei Verbrennungen 3. Grades angewendet werden.

Anwendungshinweise:

Reinigen und trocknen Sie die intakte Wundumgebungshaut. Stellen Sie sicher, dass die Haut frei von Hautreinigungsmitteln, Lotionen, Cremes etc. ist.

Die Wundauflage sollte so appliziert werden, dass die Spitze zum Gesäß zeigt. Diese dient der verbesserten Abdichtung der Gesäßspalte und sorgt für sicheren Schutz vor eindringender Nässe und bessere Haftung.

1. Entfernen Sie die Abziehfolie (1).
2. Halten Sie das Gesäß auseinander, applizieren Sie die Wundauflage mittig auf die Wunde. Fixieren Sie die Spitze durch leichten Druck und streichen Sie anschließend die Klebefläche sorgfältig von unten nach oben fest, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
3. Ziehen Sie die seitlichen Schutzfolien (2) nacheinander nach außen hin ab.
4. Nach der Platzierung streichen Sie die Wundauflage glatt. Stellen Sie sicher, dass diese vollständig auf der Haut aufliegt.
5. Entfernen Sie nun die Schutzfolie (3). Dazu greifen Sie die obere Schutzfolie an dem roten Streifen.



Tiefere Wunden sollten entsprechend der lokalen Behandlungsstandards und/oder gängigen Leitlinie(n) gegebenenfalls zuvor mit geeignetem Material austamponiert werden.

Je nach Wundzustand und Exsudatmenge kann **DracoFoam Sakral** bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben. Der Verband ist spätestens zu wechseln, wenn das Exsudat bis zum Rand des Wundkissens vorgedrungen ist.

Weitere Hinweise:

DracoFoam Sakral sollte nicht bei nicht-intakter Wundumgebungshaut angewendet werden. Zudem ist **DracoFoam Sakral** nicht als Tamponade zu verwenden. Eine Anwendung in Kombination mit oxidierenden Lösungen (z. B. Hypochlorit oder Wasserstoffperoxid) kann die Beschaffenheit und Leistung des Produktes ernsthaft beeinträchtigen und die Wundheilung stören. Fetthaltige sowie ölige Cremes oder Salben, die auf die Wundumgebungshaut aufgebracht werden, können die Klebkraft des Haftrandes des Produkts herabsetzen. Ein sicherer Halt der Wundauflage kann unter diesen Umständen nicht gewährleistet werden. Eine Abdeckung der Wundauflage mit okklusiven Verbänden kann sich negativ auf das Exsudatmanagement auswirken und wird daher nicht empfohlen.

Bei stagnierendem oder sich verschlechterndem Wundzustand sollte ein Arzt konsultiert werden. Bei kritisch kolonisierten oder infizierten Wunden kann der Einsatz nach ärztlichem Ermessen erfolgen, wenn eine geeignete Behandlung der Infektion gewährleistet ist. Dabei ist die Verbandtragedauer gegebenenfalls zu verkürzen und die Wunde regelmäßig von einem Arzt gemäß den jeweiligen Standards zu untersuchen und zu versorgen.

Eine Wunde steht immer im Zusammenhang mit dem Gesamtorganismus. Die Beseitigung aller Faktoren, die eine Wundheilung hemmen können, ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Wundbehandlung.

Bei beschädigtem oder vor Gebrauch unabsichtlich geöffnetem Sterilbarriersystem darf das Produkt nicht mehr verwendet werden.

DracoFoam Sakral ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Bei Wiederverwendung oder Wiederaufbereitung des Produkts kann dessen Beschaffenheit und Leistung ernsthaft beeinträchtigt, die Wundheilung gestört und das Infektionsrisiko erhöht werden.

Sollte dieses Produkt in Zusammenhang mit einem schwerwiegenden Vorkommnis stehen (Tod eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person; vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Anwenders oder anderer Personen; schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Gesundheit), ist dieser Vorfall dem Hersteller und dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zu melden.

DracoFoam Sakral kann nach dem Gebrauch über den Hausmüll entsorgt werden.

Verfügbare Größen:

Klein, 17,5 cm x 14,5 cm PZN: 18712020

Groß, 22,5 cm x 19,5 cm PZN: 18712037



Das Produkt ist für die angegebene maximale Wundgröße geeignet.



Das Produkt kann nicht zugeschnitten werden.



Das Produkt ist sanft haftend und es wird keine Sekundärfixierung benötigt.



Das Produkt ist für stark exsudierende Wunden geeignet.



Das Produkt ist zum Duschen geeignet.



Je nach Wundzustand und Exsudatmenge kann das Produkt bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben.

CE 0482

STERILEEO



MD Medizinprodukt

Rev.: 20250703RW100111-GA



Dr. Ausbüttel & Co. GmbH • Ernst-Abbe-Straße 4 • 44149 Dortmund • Deutschland • www.draco.de