

DracoHydro

dünn

Dünne hydrokolloide Wundauflage

DracoHydro dünn ist eine extra dünne, selbsthaftende, sterile hydrokolloide Wundauflage, bestehend aus gelbildenden Polymeren (u. a. Carboxymethylcellulose), aufgebracht auf eine semi-okklusive Polyurethanfolie. **DracoHydro dünn** ist transparent, dadurch kann der Heilungsprozess der Wunde ständig überwacht werden. Durch seine Elastizität lässt sich **DracoHydro dünn** jedem Körperbereich gut anpassen, die Wasserundurchlässigkeit ermöglicht auch das Baden oder Duschen mit der Wundauflage. In Verbindung mit dem Wundsekret verflüssigt sich **DracoHydro dünn** zu einem feuchten Gel, das günstige Voraussetzungen für den Heilungsprozess schafft.

Anwendungsgebiete:

DracoHydro dünn ist geeignet für gering exsudierende, oberflächliche sowie chronische Wunden, z. B. Ulcus cruris (venös, arteriell, diabetisches Ulcus) und Dekubitus, Abschürfungen, Verbrennungen 2. Grades und genähte Wunden. Vorübergehend auch für gesunde Haut zur Vorbeugung gegen Druckgeschwüre verwendbar.

Anwendungshinweise:

Vor Anwendung von **DracoHydro dünn** die Wunde reinigen und die Wundumgebungshaut sorgfältig trocknen. **DracoHydro dünn** aus der sterilen Einzelverpackung entnehmen, Schutzfolie abziehen, mit der selbsthaftenden Seite sanft auf die Wunde aufbringen und an den Wundrändern leicht andrücken. Dabei ist darauf zu achten, dass die Wundauflage nicht gedehnt wird und ausreichend über die Wundränder hinausgeht. Auf der Wunde aufgebracht bildet **DracoHydro dünn** ein feuchtes Gel, welches nicht mit der Wunde verkleben kann und die Wundheilung begünstigt. Die Wundauflage sollte sich am Rand bereits teilweise von selbst ablösen, bevor sie gewechselt wird. Vorzeitiges Entfernen könnte die gesunde Haut beeinträchtigen. Ein Verbandwechsel sollte nicht innerhalb der ersten 48 Stunden erfolgen, sondern je nach Wundzustand und Exsudatmenge nach 4-6 Tagen. Hierzu **DracoHydro dünn** anheben und horizontal zur Hautoberfläche abziehen, dabei die Wundauflage überdehnen und ablösen.

DRACO®

DracoHydro dünn darf nur einmal verwendet werden.

DracoHydro dünn ist steril, solange die Einzelverpackung ungeöffnet und unversehrt ist.

DracoHydro dünn nicht bei beschädigter Verpackung anwenden.

Eine Wunde steht immer im Zusammenhang mit dem Gesamtorganismus. Die Beseitigung aller Faktoren, die eine Wundheilung hemmen können, ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Wundbehandlung.

Gegenanzeigen:

DracoHydro dünn soll nicht bei Patienten mit einer bekannten Allergie gegen die Inhaltsstoffe angewendet werden.

DracoHydro dünn soll nicht angewendet werden bei:

- klinisch infizierten Wunden
- stark exsudierenden Wunden
- Wunden mit freiliegenden Sehnen oder Knochen
- tiefen, schlecht zugänglichen Wunden
- Verbrennungen 3. Grades
- ischämischen Ulzera

Verfügbare Größen:

5 cm x 5 cm PZN: 13879229

10 cm x 10 cm PZN: 02065446

Produkte, die von Dr. Ausbüttel & Co. GmbH zum einmaligen Gebrauch bestimmt sind, dürfen nicht (wieder)aufbereitet werden. Eine (Wieder)aufbereitung zerstört die funktionale Integrität der Produkte.



Rev.: 181017RW-13960-GAP