

DracoTüll

Silikon

Silikonbeschichtete Wundauflage

DracoTüll Silikon ist eine transparente, sterile und beidseitig beschichtete Wundkontaktauflage, bestehend aus einem silikonisierten Gitternetz durch welches das Wundexsudat in den Sekundärverband abfließen kann. **DracoTüll Silikon** ist sehr anschmiegsam, verrutscht nicht und dient der Abdeckung und dem Schutz der Wunde. **DracoTüll Silikon** vermindert das Verkleben der Sekundärwundauflage mit der Wunde und unterstützt so den atraumatischen Verbandwechsel und die notwendige Wundruhe.

Anwendungsgebiete:

DracoTüll Silikon ist indiziert für trockene bis stark exsudierende chronische Wunden wie diabetische Fußgeschwüre, oberflächliche Verbrennungen sowie Operations- und verletzungsbedingte Wunden, Blasen, Schnitte, Schürf- und Platzwunden. **DracoTüll Silikon** kann unter Kompression und in Verbindung mit Unterdruck-Wundtherapie verwendet werden.

Anwendungshinweise:

Den Verband so wählen, dass die Wunde und mindestens 2 cm der umliegenden Haut bedeckt werden. **DracoTüll Silikon** kann bei Bedarf mit einer sterilen Schere vor Entfernen der Schutzfolie zugeschnitten werden. Anschließend die Schutzfolie entfernen und die Handschuhe anfeuchten, damit **DracoTüll Silikon** nicht daran festklebt.

DracoTüll Silikon über die Wunde legen und auf der umliegenden Haut glattstreichen, damit der Verband gut haftet. Nachfolgend die zweite Schutzfolie entfernen.

Wenn mehr als ein Verband erforderlich ist, diese so überlappen lassen, dass die Poren frei bleiben. Über **DracoTüll Silikon** einen geeigneten Zweitverband, z.B. DracoFoam, DracoFoam haft oder eine sterile Saugkomresse anbringen. Im Bereich der Gelenke (z.B. unter dem Arm, unter der Brust, Ellenbogen-Innenseite, Leistengegend) für ausreichende Polsterung sorgen, damit **DracoTüll Silikon** flach auf der Wundfläche aufliegt.

Mit geeigneter Fixierung fixieren. **DracoTüll Silikon** kann unter Kompression verwendet werden. Je nach Wundzustand und Exsudatmenge kann **DracoTüll Silikon** bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben.



DRACO®

Warnhinweise:

Bei Verwendung der Silikon-Wundauflage nach kosmetischer Gesichtsbildung oder auf Verbrennungen, die mit Netztransplantat behandelt werden, können bei nicht sachgemäßer Anwendung des Produkts Abdrücke entstehen.

Vorsichtsmaßnahmen:

Die Wunde sollte gemäß den örtlichen Vorgaben oder der guten klinischen Praxis auf Anzeichen für eine Infektion überprüft werden.

Zur entsprechenden medizinischen Behandlung eine medizinische Fachkraft hinzuziehen.

Verwendung der Silikon-Wundauflage bei Verbrennungen, die mit Netztransplantat behandelt werden: unnötigen Druck auf den Verband vermeiden. Bei Verwendung auf blutenden Wunden oder Wunden mit hochviskosen Exsudaten sollte die Silikon-Wundauflage mit einem feuchtigkeitsabsorbierenden Verbandspad bedeckt werden. Bei Verwendung der Silikon-Wundauflage zur Fixierung von Hauttransplantaten oder zum Schutz von Blasen sollte der Verband frühestens am fünften Tag nach der Anbringung gewechselt werden.

DracoTüll Silikon ist steril, solange die Einzelverpackung ungeöffnet und unversehrt ist.

DracoTüll Silikon nicht bei beschädigter Verpackung anwenden.

DracoTüll Silikon darf nur einmal verwendet werden. Die Wiederverwendung kann zu Kreuzinfektionen führen und beeinträchtigt die Produktwirkung.

Nur zur äußerlichen Anwendung.

Gegenanzeigen:

DracoTüll Silikon ist nicht indiziert für: Tiefe Verbrennungen, Wundhöhlen, Personen mit bekannter Silikonunverträglichkeit, Chirurgische Implantation.

Verfügbare Größen:

5 cm x 5 cm PZN: 09515160

10 cm x 10 cm PZN: 08839788

Produkte, die von Dr. Ausbüttel & Co. GmbH zum einmaligen Gebrauch bestimmt sind, dürfen nicht (wieder)aufbereitet werden. Eine (Wieder)aufbereitung zerstört die funktionale Integrität der Produkte.

CE 0482

STERILE EO



0°C 25°C

Rev.: 200220RW-13974-GA



Dr. Ausbüttel & Co. GmbH • Ernst-Abbe-Straße 4
44149 Dortmund • Deutschland • www.draco.de