# Problemwunden

### erkennen und erfolgreich versorgen

### **Inhalte**





### Legende zur Produktübersicht



### Infizierte Wunden



Erkennen: Rötung, Überwärmung und Schwellung der Wundumgebung, Schmerz und Funktionseinschränkung, verzögerte Wundheilung, erhöhte Exsudatmenge, Geruch, evtl. Biofilm Versorgen: Reinigen der Wunde (geeignete Spüllösung und/oder Art des Débridements auswählen), Abstrich durchführen, lokale antiseptische Behandlung (geeignetes Antiseptikum auswählen)

### Versorgungsziele und geeignete Produkte bei infizierten Wunden

Versorgungsziele	Geeignete Produkte
	<b>DracoFoam</b> Infekt haft
<ul> <li>Bekämpfung der Wundinfektion</li> </ul>	DracoFoam (rifekt haft sensitiv
Versorgung stark bis mäßig exsudierender Wunden	DracoFoam
	DracoFoam Infekt Ferse
<ul> <li>Versorgung stark bis mäßig exsudierender Wunden, oberflächlicher und tiefer Wunden, akuter und chronischer Wunden</li> <li>Aktivierung der Wundheilung, Wundreinigung</li> </ul>	DracoAlgin
<ul> <li>Reduktion der Wundtiefe bei stark bis mäßig exsudierenden Wunden</li> <li>Unterstützt den Wundreinigungsprozess</li> </ul>	DracoHydrofaser

### **Nekrotische Wunden**



Erkennen: Nekrosen sind Gewebeschäden, die durch das Absterben von Zellen durch mangelnde Durchblutung entstehen (schwarz, braun, grün bis gelb, trocken oder feucht)

Versorgen: Größere trockene Nekroseplatten trocken versorgen, Durchblutung abklären, kleine Nekrosen können autolytisch gelöst werden, feuchte Nekrosen mit antiseptischen Materialien versorgen

### Versorgungsziele und geeignete Produkte bei nekrotischen Wunden

Versorgungsziele	Geeignete Produkte
	DracoFoam
	DracoFoam haft sensitiv
<ul><li>Versorgung stark bis mäßig exsudierender Wunden</li><li>Granulationsförderung</li></ul>	DracoFoam
	DracoFoam
	DracoFoam Zehenkappe
Reduktion der Wundtiefe bei stark bis mäßig exsudierenden Wunden     Unterstützt den Wundreinigungsprozess	DracoHydrofaser

### Fibrinbelegte Wunden



**Erkennen:** Hartnäckige Beläge, gelb bis braun, fest oder eher weich


**Versorgen:** Fibrinbeläge verzögern die Wundheilung. Je nach Ausprägung können sie z.B. autolytisch, mechanisch oder chirugisch entfernt werden.

### Versorgungsziele und geeignete Produkte bei fibrinbelegten Wunden



Versorgungsziele	Geeignete Produkte
<ul> <li>Versorgung stark bis mäßig exsudierender Wunden, oberflächlicher und tiefer Wunden, akuter und chronischer Wunden</li> <li>Aktivierung der Wundheilung, Wundreinigung</li> </ul>	DracoAlgin
<ul><li>Reduktion der Wundtiefe bei stark bis mäßig exsudierenden Wunden</li><li>Unterstützt den Wundreinigungsprozess</li></ul>	DracoHydrofaser
<ul> <li>Versorgung mäßig bis gering exsudierender Wunden</li> <li>Förderung der Granulation</li> <li>Unterstützt das autolytische Debridement</li> </ul>	DracoHydro

### **Granulierende Wunden**

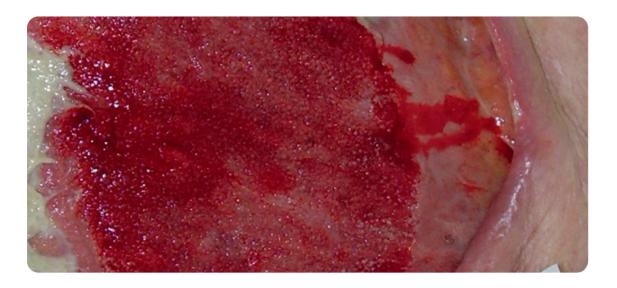

**Erkennen:** saubere, gut durchblutete, leicht gekörnte und feucht-glänzend schimmernde Oberfläche

**Versorgen:** Idealfeuchte Versorgung unterstützt die Wundheilung

# Versorgungsziele und geeignete Produkte bei granulierenden Wunden

Versorgungsziele	Geeignete Produkte
	DracoFoam
Version and his or "O' more discovered a Western	DracoFoam haft sensitiv
<ul> <li>Versorgung stark bis mäßig exsudierender Wunden</li> <li>Granulationsförderung</li> </ul>	DracoFoam
	DracoFoam
	DracoFoam Zehenkappe
<ul><li>Reduktion der Wundtiefe bei stark bis mäßig exsudierenden Wunden</li><li>Unterstützt den Wundreinigungsprozess</li></ul>	DracoHydrofaser
<ul> <li>Versorgung mäßig bis gering exsudierender Wunden</li> <li>Förderung der Granulation</li> <li>Unterstützt das autolytische Debridement</li> </ul>	DracoHydro

### **Epithelisierende Wunden**



**Erkennen:** Epithelgewebe erscheint rosa, hellrosa bis weißlich, zartes und dadurch empfindliches Gewebe

**Versorgen:** Möglichst lange Wundruhe gewähren, möglichst geringe mechanische Belastungen

## Versorgungsziele und geeignete Produkte bei epithelisierenden Wunden

Versorgungsziele	Geeignete Produkte
<ul> <li>Versorgung gering exsudierender bis trockener Wunden</li> <li>Förderung, Stabilisierung und Schutz des Epithelgewebes</li> </ul>	DracoHydro
Schutz des Wundgrundes und der Wundumgebungshaut vor Verklebung mit Sekundärverbänden bei stark exsudierenden bis trockenen Wunden	DracoTüll

# Produkte für infizierte Wunden

Produkt						<b>⊘</b>	\$\frac{1}{2}\text{\$\tex{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitit\\$}}}}\$}\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\	3	<b>&gt;</b>	1			Varianten	PZN	Inhalt
DracoFoam Infekt Schaumstoffwundauflage für infizierte Wunden	×	× × × ×	×	×		×	×			×	×	<b>×</b>	5 x 5 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm 20 x 20 cm	10317608 10317614 10317620 10317637	Steril, 10 Stück pro Packung
DracoFoam Infekt Ferse Schaumstoffwundauflage für infizierte Wunden	×	× × ×	×	×		×	×			×	× ×	*	anatomische 3D-Passform	10317643	Steril, 5 Stück pro Packung
DracoFoam Infekt haft Schaumstoffwundauflage für infizierte Wunden mit Haftrand	×	× × ×	×	×		×	×			×		×	5 x 5 cm 7,5 x 7,5 cm 10 x 10 cm 12,5 x 12,5 cm	11300219 07730635 10084110 07730658	Steril, 10 Stück pro Packung
DracoFoam Infekt haft sensitiv Schaumstoffwundauflage für infizierte Wunden mit SilikonHaftrand		× × ×	×	×		×	×			×		×	30 g	11670146	1 Tube à 30 g mit Applikator
<b>DracoAlgin</b> Alginatkompresse	×	× × ×	×	×		×	×		×	×	-	×	5 x 5 cm 10 x 10 cm	13858003 01003785	Steril, 10 Stück pro Packung
<b>DracoHydrofaser</b> Gelbildender Faserverband	×	× × ×	×	×		×	×		× ×	×			10 × 10 cm	12554471	Steril, 10 Stück pro Packung

# Schaumstoffwundauflagen für nicht infizierte Wunden

Inhalt	Steril, 10 Stück pro Packung	Steril, 5 Stück pro Packung	Steril, 10 Stück pro Packung	Steril, 10 Stück pro Packung	Steril, 10 Stück pro Packung	Steril, 10 Stück pro Packung
PZN	07415075 04350429 06836544 03693587	05484669	10003146 06733293 10003123 06681550	11376174 10342078 10342115 10342144	12543361 12543378	16086423 16086446
Varianten	5 x 5 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm 20 x 20 cm	anatomische 3D-Passform	5 x 5 cm 7,5 x 7,5 cm 10 x 10 cm 12,5 x 12,5 cm	5 x 5 cm 7,5 x 7,5 cm 10 x 10 cm 12,5 x 12,5 cm	klein (Umfang 5,6 cm) groß (Umfang 10,6 cm)	10 × 10 cm 10 × 20 cm
	×	×	×	×	×	×
1	×	× × ×			×	× ×
	×	×	×	×	×	×
2						
3						×
<b>○</b>	×	×	×	×		×
<b>N</b>	×	×	×	×	×	×
<b>20</b> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					×	
	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	× × ×
	×	×	×	×	×	×
Produkt	DracoFoam Schaumstoffwundauflage non-haft	DracoFoam Ferse Schaumstoffwundauflage für die Ferse	DracoFoam haft Schaumstoffwundauflage mit Haftrand	DracoFoam haft sensitiv Schaumstoffwundauflage mit Silikon-Haftrand	DracoFoam Zehenkappe Dünne Schaumstoffwundauflage für Zehen	DracoSuperabsorber Superabsorbierende Wundauflage
						B

# Hydrogele und Hydrokolloide

			% 		900	20	<b>⊘</b>	<b>3</b>	9		Varianten	PZN	Inhalt
<b>DracoHydro</b> Hydrokolloide Wundauflage	×	×		-	×	×		~		×	5 x 5 cm 10 x 10 cm	13879212 02745402	Steril, 10 Stück pro Packung
DracoHydro dünn Dünne hydrokolloide Wundauflage			×		×			~		×	5 x 5 cm 10 x 10 cm	13879229 02065446	Steril, 10 Stück pro Packung
DracoTüll Silikon Silikonbeschichtetes Wunddistanzgitter		×	× × ×		×	×	×			× × ×	5 x 5 cm 10 x 10 cm	09515160 08839788	Steril, 10 Stück pro Packung

### Nutzen Sie auch unsere digitalen Angebote!



Sie sind auf Facebook? Prima, wir auch. Folgen Sie uns unter: www.facebook.com/DRACOWundversorgung



Auch auf Instagram finden Sie stets aktuell hilfreiche Tipps, Hinweise zu Produkten und Informationen rund um die moderne Wundversorgung: www.instagram.com/dracowundversorgung



Besuchen Sie unseren YouTube-Kanal und erweitern Sie Ihr Wundwissen: www.youtube.com/c/draco-wundversorgung

### Als Erstes informiert werden

über neues Wissen rund um die moderne Wundversorgung. Unsere Newsletter-Abonnenten erhalten hilfreiche Infos vor allen anderen.

- Sichern Sie sich exklusiv einen Platz in der nächsten Fortbildung!
- Wundwissen und aktuelle Abrechnungsgrundlagen für die Praxis
- Produktneuheiten und kostenlose Muster

Jetzt auf unserer Website zum Newsletter anmelden unter https://www.draco.de/newsletter

