

Schaumstoffwundauflage mit Silikon-Haftrand für die Ferse

Zur Bewältigung überschüssigen Exsudats akuter und chronischer Problemwunden an der Ferse

DracoFoam Ferse haft ist eine sterile hydrophile Polyurethanschaumstoffwundauflage zur Abdeckung akuter und chronischer Wunden, zur Aufnahme und Speicherung von Wundexsudat sowie zur Erhaltung eines feuchten Wundmilieus. Der flexible Polyurethan-Schaum wölbt sich in der Anwendung dem Wundgrund entgegen und besitzt ein hohes Exsudataufnahmevermögen. Die überschüssige Flüssigkeit wird zur Polyurethan-Membran transportiert, sodass diese dort abdampfen kann. Die Polyurethan-Folie verhindert das Entweichen des Exsudats und stellt eine Barriere gegen Erreger von außen dar.


DracoFoam Ferse haft ist zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal sowie Laien im häuslichen, ambulanten und stationären Umfeld geeignet.

Indikationen:


DracoFoam Ferse haft ist geeignet für Wunden mit hohem Exsudataufkommen, z. B. oberflächliche und tiefere akute und chronische Wunden wie Ulcus cruris (venös, arteriell), Dekubitus oder diabetisches Fußsyndrom, postoperative Wunden und Verbrennungen bis zum 2. Grad, beispielsweise an der Ferse.

Kontraindikationen:


DracoFoam Ferse haft darf nicht bei zu trockenen Wunden und/oder bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Polyurethan, Silikon(kleber) oder Polyacrylat(kleber) angewendet werden. Außerdem darf **DracoFoam Ferse haft** nicht bei Verbrennungen 3. Grades angewendet werden.

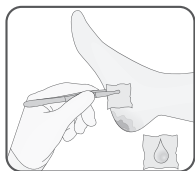


Wunde reinigen und
Wundrand trocknen

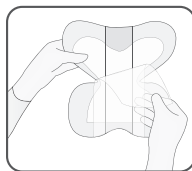


Mittlere Schutzfolie entfernen

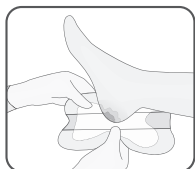


Wundauflage mittig an der
Ferse platzieren, gerade
Schaumstoffkante zur
Fußspitze

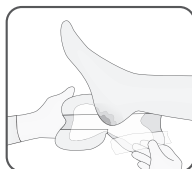

Obere Schutzfolien abziehen
und Flügel am Knöchel
fixieren

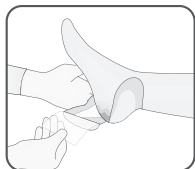

Untere Schutzfolien abziehen
und Flügel am Fuß fixieren

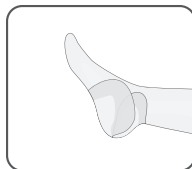

Auf faltenfreie Anbringung
prüfen und bei Bedarf
korrigieren

Anwendungshinweise:

Vor der Anwendung von **DracoFoam Ferse haft** ist die Wunde zu reinigen und die Wundumgebungshaut sorgfältig zu trocknen.

Entnehmen Sie **DracoFoam Ferse haft** aus der sterilen Einzelverpackung und entfernen Sie die mittlere Schutzfolie, ohne dabei das Wundkissen zu berühren. Platzieren Sie die Wundauflage mittig an der Ferse, dabei zeigt die Schaumstoffkante zur Fußspitze. Entfernen Sie die Schutzfolien von beiden Oberseiten und bringen Sie die oberen Flügel faltenfrei nacheinander am Knöchel an. Den Verband nicht dehnen. Entfernen Sie anschließend die unteren Schutzfolien und bringen Sie die übrigen beiden Flügel faltenfrei an der Fußsohle an. Auch hierbei den Verband nicht dehnen. Überprüfen Sie zuletzt die korrekte Anbringung der Wundauflage mit vollständigem Hautkontakt.

Die Sensitiv-Silikon-Technologie erlaubt ein Repositionieren des Verbandes, um eine faltenfreie Applikation zu erzielen und ist zur Anwendung auf fragiler Haut geeignet. Dank des Haftrandes des Produkts wird keine weitere Fixierung benötigt. Es ist darauf zu achten, dass die Schaumstoffwundauflage ausreichend über die Wundränder hinausgeht und der Haftrand nicht auf die Wunde geklebt wird.

DracoFoam Ferse haft kann auch im Rahmen einer Kompressionstherapie eingesetzt werden.

Tiefere Wunden sollten entsprechend der lokalen Behandlungsstandards und/oder gängigen Leitlinie(n) gegebenenfalls zuvor mit geeignetem Material austamponiert werden.

Je nach Wundzustand und Exsudatmenge kann **DracoFoam Ferse haft** bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben. Der Verband ist spätestens zu wechseln, wenn das Exsudat bis zum Rand des Wundkissens vorgedrungen ist.

Weitere Hinweise:

DracoFoam Ferse haft sollte nicht bei nicht-intakter Wundumgebungshaut angewendet werden. Zudem ist **DracoFoam Ferse haft** nicht als Tamponade zu verwenden.

Eine Anwendung in Kombination mit oxidierenden Lösungen (z. B. Hypochlorit oder Wasserstoffperoxid) kann die Beschaffenheit und Leistung des Produktes ernsthaft beeinträchtigen und die Wundheilung stören. Fetthaltige sowie ölige Cremes oder Salben, die auf die Wundumgebungshaut aufgebracht werden, können die Klebkraft des Haftbandes des Produkts herabsetzen. Ein sicherer Halt der Wundauflage kann unter diesen Umständen nicht gewährleistet werden. Eine Abdeckung der Wundauflage mit okklusiven Verbänden kann sich negativ auf das Exsudatmanagement auswirken und wird daher nicht empfohlen.

Bei stagnierendem oder sich verschlechterndem Wundzustand sollte ein Arzt konsultiert werden. Bei kritisch kolonisierten oder infizierten Wunden kann der Einsatz nach ärztlichem Ermessen erfolgen, wenn eine geeignete Behandlung der Infektion gewährleistet ist. Dabei ist die Verbandtragedauer gegebenenfalls zu verkürzen und die Wunde regelmäßig von einem Arzt gemäß den jeweiligen Standards zu untersuchen und zu versorgen.

Eine Wunde steht immer im Zusammenhang mit dem Gesamtorganismus. Die Beseitigung aller Faktoren, die eine Wundheilung hemmen können, ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Wundbehandlung.

Bei beschädigtem oder vor Gebrauch unabsichtlich geöffnetem Sterilbarriersystem darf das Produkt nicht mehr verwendet werden.

DracoFoam Ferse haft ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Bei Wiederverwendung oder Wiederaufbereitung des Produkts kann dessen Beschaffenheit und Leistung ernsthaft beeinträchtigt, die Wundheilung gestört und das Infektionsrisiko erhöht werden.

Sollte dieses Produkt in Zusammenhang mit einem schwerwiegenden Vorkommnis stehen (Tod eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person; vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Anwenders oder anderer Personen; schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Gesundheit), ist dieser Vorfall dem Hersteller und dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zu melden.

DracoFoam Ferse haft kann nach dem Gebrauch über den Hausmüll entsorgt werden.

Verfügbare Größe:

Einheitsgröße, anatomische Passform, PZN: 19964108



Das Produkt ist für stark exsudierende Wunden geeignet.



Das Produkt ist sanft haftend und es wird keine Sekundärfixierung benötigt.



Das Produkt kann nicht zugeschnitten werden.



Das Produkt ist zum Duschen geeignet.



Je nach Wundzustand und Exsudatmenge kann das Produkt bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben.

CE 0482

STERILE EO



Medizinprodukt

